




DOLomite MAXI

Alä käytä rollaattoria pyörällä tai henkilökuljetuksiin.

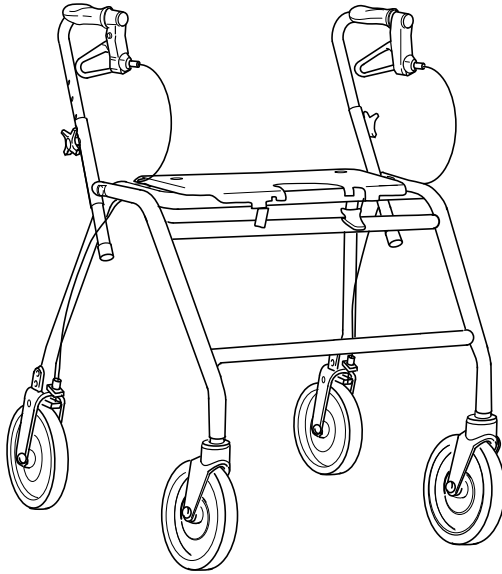


KÄYTTÖOHJEET

Lue tarkoin käyttöohjeet ennen käyttöä.
Rollaattori on tehty sekä sisä- että ulkokäyttöön.




TURVALLISUUS

- Seisominen rollaattorin päällä on kielletty, samoin sen käyttäminen henkilökuljetukseen.
 - Älä seiso koskaan rollaattorilla.
 - Käytä istuinta istumiseen.
 - Älä koskaan ponni jaloilla vauhtia istuessasi.
 - Älä käytä portaiden nousemiseen tai laskeutu miseen tai rullaportaissa.
 - Kun istut rollaattorilla, niin molempien jarrujen tulee olla pysäköintiasennossa.
 - Rollaattorin tulee olla täysin avattuna kun sitä käytetään. HUOM.! Käytetään ainoastaan kävelytukena.
 - Noudata varovaisuutta kaltevalla alustalla.
 - Noudata varovaisuutta kun korissa on raskas kuorma. Kuormaa saa kuljettaa ainoastaan korissa tai kuormahyllyllä.
- Kuorman enimmäis paino korissa on 9 kg ja kuormahyllyllä 5 kg.

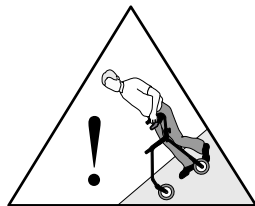


LISÄVARUSTE

- A) Korin asentaminen.
B) Tarjottimen asentaminen muovitulppien avulla.

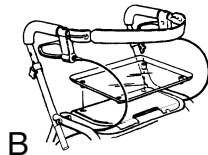



YLÖSKÄÄNNETTÄVÄ ISTUIN

Istuimen tulee olla ylhäällä, jolloin saadaan parempi kävelytila ja ulottuvuus.

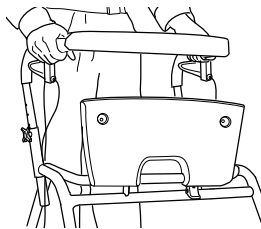


TAITTAMINEN KOKOON

1. Paina lukitussalpa alas.
2. Vedä istuinputki ylöspäin.

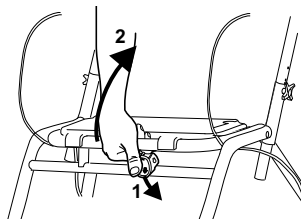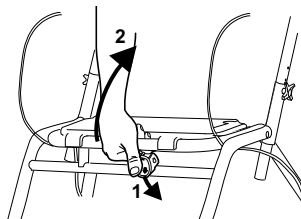

KÄYTTÖVALMIUS

Avaa rollaattori painamalla istuinputkea. Tarkista, että salpa on lukittu rollaattorin ollessa täysin avattuna.

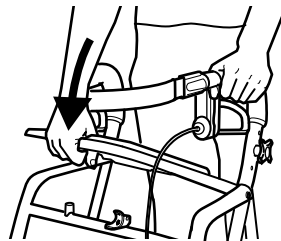

AJOJARRUT

Jarruta vetämällä molempia jarrukahvoja ylöspäin.

PYSÄKÖINTIJARRU

Paina kahvat pehmeästi alas jarrutasentoon.

Selvä naksahdus ilmoittaa jarrun olevan oikeassa asennossa.

On tärkeää, että molemmat jarrukahvat ovat pysäköintiasennossa.

Pysäköintijarrujen vapautus tapahtuu vetämällä kahvoja ylöspäin. Rollaattorilla istuttaessa molempien jarrukahvojen tulee olla pysäköintiasennossa.

JARRUTEHON SÄÄTÖ






Työkalut eivät sisälly toimitukseen.

Sopivia työkaluja ovat 8 ja 10 mm kiintoavaimet (eivät seuraa mukana).

KÄSIKAHVAT

Seiso rollaattorin takana ja säädä kahvat haluttuun korkeuteen. Kahvat tulee normaalisti säätää ranteen korkeudelle. Mikäli sinulla on erikoistarpeita, ota yhteys apuvälinemääräyksesi antajaan.

Käsi kahvojen korkeussäätö: Kierrä mutteriin kokonaan, irroita ruuvi. Säädä käsi kahvat sopivalle korkeudelle. Aseta ruuvi takaisin, katso että 6-kanta asettuu reikään oikein. Kiristä huolellisesti. Säädä käsi kahvat sopivalle korkeudelle.

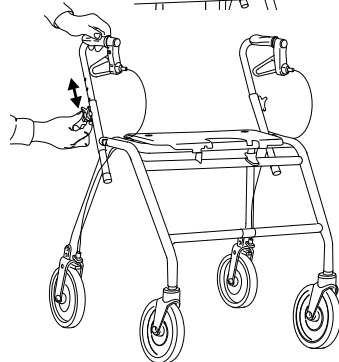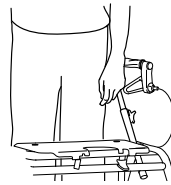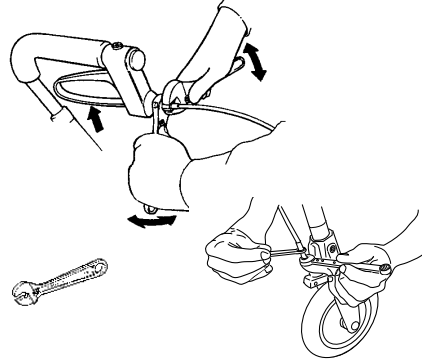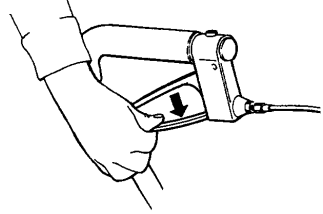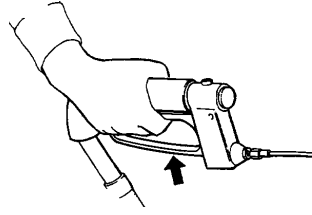

PUHDISTUS - HUOLTO

Rollaattorin toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi huolehdi seuraavista asioista:

- Puhdista rollaattori tavallisella puhdistusaineella ja kuivaa se. Pidä pyörät puhtaina.
- Tarkista ruuvien ja säätimien kireys.
- Mikäli rollaattori ei toimi kunnolla, ota yhteys välittömästi huoltoon
Älä käytä viallista rollaattoria.

Huom! Käytä vain kävelyapuvälineenä. Painorajoitus 200 kg.


DOLOMITE ei vastaa rollaattoriin itse tehdyistä muutoksista.

OHJEET TUOTTEEN JA PAKKAUKSEN HÄVITYKSESTÄ

Kun tuote on käytetty, niin se tulee yhdessä varusteiden ja pakkausmateriaalin kanssa lajitella oikealla tavalla. Yksittäiset osat voidaan irrottaa toisistaan ja käsitellä materiaalitunnuksen mukaisesti.

DOLOMITE MAXI etiketissä ovat kaikki tärkeät tekniset tiedot.

1. Artikkelinumero
2. Tuotteen nimi
3. Sarjanumero
4. Valmistuspäivämäärä
5. Käyttäjän enimmäispaino
6. HUOM.! Katso käyttöohjeita
7. Valmistajan nimi

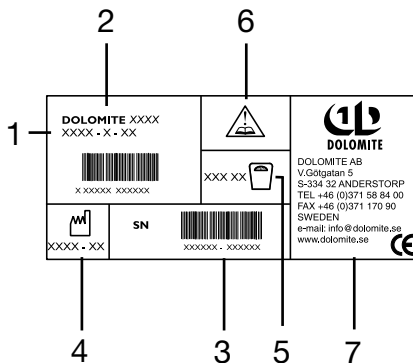

DOLOMITE AB, Box 55, 334 21 ANDERSTORP, SWEDEN
TEL +46 (0)371 58 84 00, FAX +46(0)371 170 90
E-mail: info@dolomite.se, www.dolomite.se

ALGOL OY, Pharmaceutical Division, P.O.BOX 13, FI-02611 ESPOO
Puhelin: 00358-950991