

KÄYTTÖOHJEET

Lue tarkoin käyttöohjeet ennen käyttöä.
Rollaattori on tehty sekä sisä- että ulkokäyttöön.

TURVALLISUUS

- Seisominen rollaattorin päällä on kielletty, samoin sen käyttäminen henkilökuljetukseen.
- Älä koskaan istu rollaattorilla ja potki vauhtia jaloillasi.
- Kun istut rollaattorilla, molempien jarrujen on oltava pysäköintiasennossa.
- Pysäköintijarrujen on oltava jarrutusasennossa, kun rollaattoria käytetään tukena noustaessa ylös esimerkiksi tuolista.
- Rollaattorin on oltava täysin avattuna ja lukittuna kun kävelet sen kanssa.
HUOM! Käytetään ainoastaan kävelytukena.
- Noudata varovaisuutta kaltevilla alustalla.
- Älä nouse tai laskeudu portaita rollaattorin kanssa.
- Älä käytä rollaattoria rullaportaisissa.
- Noudata varovaisuutta kun korissa on raskas kuorma. **DOLOMITE MELODYn S** korin enimmäiskuorma on 7 kg **DOLOMITE MELODYn M, L** korin 10 kg, ja **DOLOMITE SOPRANO**n korin 12 kg. Kuorma on tarkoitettu kuljetettavaksi ainoastaan korissa tai kuormahyllyllä (**DOLOMITE SOPRANO**).
HUOM! Tarkista, että korissa oleva kuorma tai kuormahylly eivät paina salpaa/lukitusta.

KÄYTTÖASENTO








Nosta eturunko purettaessa tai avattaessa kuljetusasennosta, kuvan C mukaisesti.

1. Avaa rollaattori painamalla istuinputkea.
Tarkista, että salpa on lukittu rollaattorin ollessa täysin avattuna.
2. Istuimen tulee olla ylhäällä, jolloin saadaan parempi kävelytila ja ulottuvuus.

TAITTAMINEN KOKOON

Käytettäessä koria, se täytyy irrottaa ennen kuin rollaattori taitetaan kokoon.

1. Paina lukitusvalppa alas.
 2. Vedä istuinputki ylöspäin.
 3. Rollaattori voidaan taittaa kokoon kahden eri asentoon.
- A Rollaattorin pysäköimiseksi se tulee taittaa kokoon ensimmäiseen asentoon.
B Kuljetusta varten rollaattori suositellaan taitettavaksi vielä seuraavaan, eli sisimpään asentoon. Huomaa, että rollaattori ei tällöin pysy pystyssä.
C Avaaminen kuljetusasennosta.

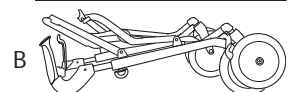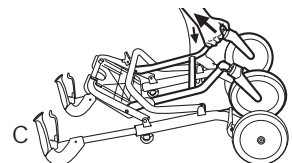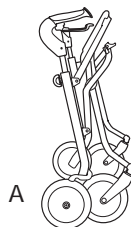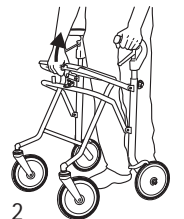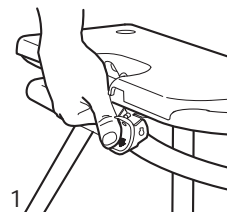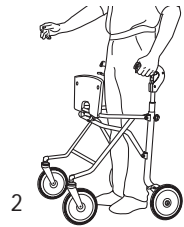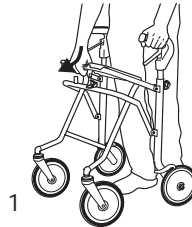


AJOJARRUT

Jarruta vetämällä molempia jarrukahvoja ylöspäin.


PYSÄKÖINTIJARRU

1. Paina kahvat pehmeästi alas jarrutus-asentoon.
Selvä naksahdus ilmoittaa jarrun olevan oikeassa asennossa.
On tärkeää, että molemmat jarrukahvat ovat pysäköintiasennossa.
2. Pysäköintijarrujen vapautus tapahtuu vetämällä kahvoja ylöspäin.
Käyttäjälle, jonka mielestä rollaattori rullaa liian kovaa ja joka käyttää tämän vuoksi jatkuvasti jarrua, suosittelemme laahusjarrulla (lisävaruste) varustettua rollaattoria.

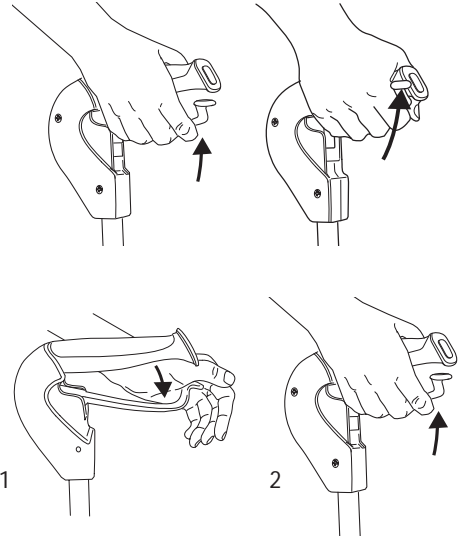

TARJOTTIMEN JA KORIN ASENNUS



- A DOLOMITE MELODY
B DOLOMITE SOPRANO

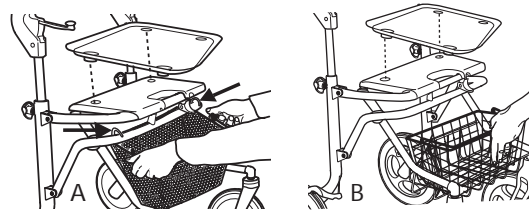

AJOKAHVOJEN SÄÄTÖ

HUOM! Jarru ei saa olla päällä kahvaa säädettäessä.

1. Avaa korkeussäätöruuvit irrottamalla niitä kokonaan.
2. Säädä haluttuun korkeuteen, normaalisti ranteen korkeudelle.
3. Kahvat voidaan kääntää sisäänpäin mukavampaan asentoon tai kun ranteen liikuntakyky on rajoitettu.
4. Kiristä korkeussäätöruuvit.

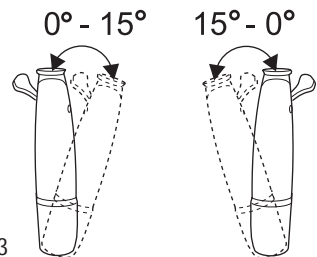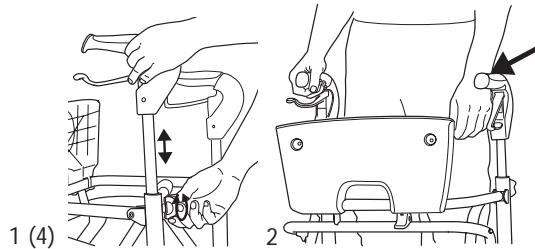

Mikäli on olemassa vaara, että käyttäjä kiertää korkeussäätöruuvit irti, niin ne tulee korvata lukkoruuveilla (lisävaruste).

